



### Descripción del producto

**CarieQuin** es una solución colorante detectora de caries.

El tejido infectado se pigmenta de color azul oscuro.

### Propiedades fisicoquímicas

- Color: Característico.
- Olor: Característico.
- pH: 7,0 - 8,5.
- Densidad: 1,00 - 1,04 g/mL.

### Ingredientes

Azul brillante, propilenglicol, conservante y agua purificada.

### Presentación

Gotero 10 mL.

### Fecha de expiración

3 años desde su fabricación.



### Instrucciones de uso

- Uso exclusivamente profesional.
- Agítese bien antes de usar.
- Aíslela caries diente con un dique de goma antes de aplicación del producto.
- Después de lavar y secar la caries del dique ponga una gota de **CarieQuin** en un cepillo desechable y aplíquelo a la cavidad.
- Tras 10 a 30 segundos, lávelo con agua.
- Retire la dentina cariada externa que es manchada de azul.
- Repita la detección y reducción unas cuantas veces más para garantizar la completa eliminación de la dentina cariada exterior.

### Precauciones y advertencias

- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de sensibilidad a cualquier componente de la fórmula, suspender su uso.
- Evite el contacto con los ojos.

### Condiciones de almacenamiento

- Temperatura: < 30°C.
- Mantener un cierre hermético en todo momento.

