

PH NEUTRO

FLUOR QUIN



DESENSIBILIZANTE DENTAL

Descripción del producto

Tratamiento tópico dental para profilaxis de caries.

FluorQuin Neutro es un remineralizante y desensibilizante, de pH neutro, indicado en casos de sensibilidad dental.

Antes y/o después de los procedimientos de blanqueamiento, tallado, cavidades profundas, post ortodoncia y abrasión generalizada por cepillado.

Propiedades fisicoquímicas

- Color: Característico.
- Olor: Característico.
- pH: 6,0-8,0.
- Densidad: 1,04 - 1,08 g/mL.
- Viscosidad: 12,0 - 14,0 Pa·s.

Ingredientes

Fluoruro de Sodio 2%, ácido cítrico, excipientes, agua purificada.

Presentación

- 240 mL.

Fecha de expiración

3 años desde su fabricación.

FICHA TÉCNICA

Registro Sanitario 683-DMN-0322



Instrucciones de uso

- Uso exclusivamente profesional.
- Agitar antes de usar.
- Seguir instrucciones de en la etiqueta.
- Colocar en una cubeta la cantidad suficiente, 1/3 de su volumen.
- Seque bien el diente antes de insertar la cubeta en la boca.
- Muerda entre 15 a 30 segundos.
- Retire la cubeta, escupa, remueva el exceso, airear suavemente.
- No comer ni beber durante la próxima hora.
- Si hay sensibilidad después del blanqueamiento suspender el tratamiento 1 o 2 días.
- Para otros casos de sensibilidad por procedimientos dentales aplíquese a criterio del odontólogo.

Precauciones y advertencias

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir, en caso de ingerir una cantidad anormal tomar leche y busque ayuda médica.
- En caso de sensibilidad a cualquier componente de la fórmula, suspender su uso.

Condiciones de almacenamiento

- Temperatura: < 30°C.
- Manténgase cerrado, en un lugar fresco y seco, retirado de la luz directa.



Mediquin
Industrias Mediquin Cia. Ltda.

☎ 02 2466 710

☎ 0984153143

✉ ventas@imediquin.com