

# PHYLAX

Pasta profiláctica con flúor para limpieza y pulido dental

## FICHA TÉCNICA

Registro Sanitario 681-DMN-0222



### Descripción del producto

**Phylax** es una pasta profiláctica suave con piedra pómez, diseñada eficazmente para la remoción de sarro, manchas y residuos durante procedimientos de profilaxis.

Elimina la placa bacteriana sin dañar el esmalte y sin dejar residuos.

Contiene flúor para contribuir a la protección del esmalte dental.

### Propiedades fisicoquímicas

- Color: Característico.
- Sabor: Característico.
- pH: 8,0 - 10,0.
- Densidad: 1,23 - 1,27 g/mL.

### Ingredientes

Fluoruro de sodio, abrasivos, humectante, saborizante, colorante, excipientes, agua purificada.

### Presentación

Frascos de 60 g y 140 g.

### Fecha de expiración

3 años desde su fabricación.

### Instrucciones de uso

- Uso exclusivamente profesional.
- Colocar **Phylax** en un vaso dappen u otro recipiente adecuado.
- Iniciar la aplicación utilizando velocidades bajas o moderadas, usar copa de caucho o cepillo para profilaxis.
- Lávese bien la zona cutánea expuesta después de la manipulación.

### Precauciones y advertencias

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- En caso de sensibilidad a cualquier componente de la fórmula, suspender su uso.

### Condiciones de almacenamiento

- Temperatura: < 30°C.
- Manténgase cerrado, en un lugar fresco y seco, retirado de la luz directa.



**Mediquin**  
Industrias Mediquin Cia. Ltda.

☎ 02 2466 710

☎ 0984153143

✉ [ventas@imediquin.com](mailto:ventas@imediquin.com)