



Descripción del producto

MediFilm es un agente desmoldante de yeso-yeso y yeso-acrílico utilizado en la técnica de enmuflado para evitar el contacto directo de la resina y el yeso dental sin alterar dimensiones.

El gel penetra profundamente en el yeso obstruyendo todas las microporosidades del modelo sin provocar ninguna variación dimensional. Permite que las prótesis se desprendan fácilmente del yeso después de la polimerización.

Propiedades fisicoquímicas

- Aspecto: líquido viscoso.
- Olor: Característico.
- Color: Característico.
- pH: 10,0 -12,0.
- Densidad: 1,01-1,05 g/mL.
- Viscosidad: 3,0 - 4,0 Pa·s.

Ingredientes

Alginato sódico, fosfato trisódico, humectante, colorante, aroma, excipientes y agua purificada.

Presentaciones

250mL, 500mL, 1 litro y 3.78 litros.

Fecha de expiración

2 años desde su fabricación.

Instrucciones de uso

- Uso exclusivamente profesional.
- Agite antes del uso.
- Aplique uniformemente con un pincel sobre el modelo humedecido.
- Aplique una capa y deje secar antes de continuar con la siguiente, en caso de ser necesario.

Condiciones de almacenamiento

- Temperatura: < 30°C.
- Mantener un cierre hermético en todo momento.
- No diluir.

